



it's safe here.

instrukcja

pierwszego uruchamiania
defibrylatora AED

HS medical

pierwsze uruchamianie

1. rozpakuj

Rozpakuj defibrylator AED oraz zestaw PAD PAK z opakowań.



2. odwróć

Odwróć defibrylator AED i połóż na równej powierzchni.



3. wsuń

Wsuń PAD PAK.
Bateria z elektrodami są prawidłowo włożone jeśli usłyszysz „kliknięcie”



4. gotowe!

Samaritan PAD wykona test automatyczny. Po pomyślnym zakończeniu testu, będzie migał **zielony wskaźnik** stanu urządzenia. Oznacza to, że defibrylator AED jest gotowy do użycia.

